

Vakantiecheck Praktijksluiting - Tip van Tom (Habitat Dental)

Voor sluiting:

- ☐ Zet behandelstoel in spoelstand weg volgens handleiding
- ☐ Spoel afzuigunit met DÜRR MD 555 en daarna met Orotol Plus
- ☐ Leeg en reinig flessensysteem, bewaar fles met opening naar boven
- ☐ Draai waterkranen in de behandelruimte dicht
- ☐ Zet compressor en afzuigsysteem volledig uit
- ☐ Stuur hoekstukken op voor preventieve controle
- ☐ Verwijder gevoelige apparatuur van het stroomnet
- ☐ Noteer herstartdatum in je agenda

Bij terugkomst:

- ☐ Spoel waterleidingen van stoel 30 sec per instrument
- ☐ Laat alle waterkranen minimaal 1 minuut lopen
- ☐ Controleer filters, vul flessystemen bij
- ☐ Bel ons bij twijfel: 0591 63 06 66